



## DURASOL CONSERVADOR ÁPOLÓSZER ÚJ FORMULA

Gázáteresztő és kemény kontaktlencsék fertőtlenítéséhez és nedvesítéséhez.  
120 ml.

A Durasol Conservador ápolószer gázáteresztő és kemény (PMMA) kontaktlencsék ápolására készült oldat, a lencsét a tokban történő tárolás közben fertőtleníti. Nagy nedvesítőképessége meghosszabbítja a lencsék élettartamát és megkönnyíti felhelyezésüket.

### HASZNÁLATA

1. Mossa meg alaposan a kezét.
2. Amint a lencsét Durasol Limpiador tisztítóval megtisztította, helyezze őket a tokjukba, merítse bele a Durasol Conservador ápolószerbe, és hagyja ott másnapig, de legalább hat órán keresztül.
3. Amikor a kontaktlencsét újból használni kívánja, vegye ki őket a tokjukból, és helyezze fel őket máris a szemére.
4. Amennyiben használat közben a lencsét le kell vennie, cseppentsen néhány csepp Durasol Conservador ápolószert a lencsére, mielőtt újból felhelyezné őket.

### ELŐVIGYÁZATOSSÁGI SZABÁLYOK

- \* A palackot használaton kívül jól lezárva tartsa.
- \* A lencsék tokját naponta töltsse fel friss Durasol Conservador ápolószerrel.
- \* Felnyitás után 90 napon belül használja fel.
- \* Gyermekek elől elzárva tartsa.

### ÖSSZETÉTEL

Hidroxi-propil-metil-cellulóz, poloxamer, 0,1%-os dinátrium-edetát és 0,0004%-os polihexametilén-biguanid, polimer izotónikus és tamponált hordozóanyagban.

Aszeptikus palackozásban

CE 0318